

# Pioneer

左右の耳元で集音するから  
聞きたい声が自然に聞こえます。



累計出荷台数

**37万台**  
突破

since 1998



ボイスモニタリングレシーバー(集音器)

*femimi*  
フェミニミ

# 聞きたい声が自然に聞こえる喜び。 会話が弾むから、日々の生活が明るく楽しくなります。

聞きたい声が自然に聞こえる。家族や友人との会話を存分に楽しめる。そんな喜びを、19年以上にわたってお届けしてきたフェミミ。

左右の耳元で集音することで培ってきた実績とステレオ(左右2チャンネル)再生で立体感を生み出してきたパイオニアブランドならではの技術を結集し、日常の「聞こえ」を支えます。

あなたがあなたらしく、心地よく暮らせるように。

ボイスモニタリングレシーバー

## VMR-M750(N)

オープン価格

JANコード:4573243091365

フェミミの詳しい  
情報はこちらです!



<http://pioneer-communication.com/kikoe/femimi/>



軽量  
19g\*

※電池、クリップ部を除く

## フェミミは人生をもっと明るく、楽しく 過ごしていただくためのパートナーです。

あなたやあなたのご家族に  
こんな事ってありませんか?



- 家族にテレビの音が大きいと言われる。
- 会話中の聞き間違いや二度聞きが多い。
- 病院の待合室で名前を呼ばれても気が付かない。
- 「日比谷」と「渋谷」など、聴き間違えることがある。

【フェミミの特長】

クリアな  
音で快適

操作が  
簡単

便利な  
充電式

シンプルだから誰もが  
かんたんに使えます。




# 「聞きたい声が自然に聞こえる」 理想の「聞こえ」を実現するためのさまざまな機能

## 雑音を抑制

周囲の雑音を自動で抑制し、人の声をクリアな音質で聞き取りやすくします。

「人の声」か「雑音」かを瞬時に判断し、雑音成分のみを抑制します。

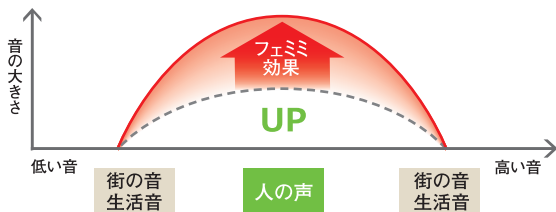

※イメージです。

## ハウリングの抑制

ハウリングによる不快なピーピー音を抑制。電話の時でも快適に使用できます。

## イヤホンの左右のバランス調整

左右の音のバランスが調整できます。音の片寄りを無くし、自然に聞くことができます。

## 耳を保護

自動音量調整回路 (ALC)により突然の大きな音から耳を保護します。

## 会話を楽しむための音創り

フェミミは、左右のイヤホンに装備したマイクから集音することで、自然な聞こえ方を実現しました。日常のさまざまなシーンでお使い頂けます。




# 毎日の生活の中で誰もが使いやすく。 そのためにすべてをかたんでシンプルにしました。

## 本体部

コンパクトなボディに使いやすく配置された  
大きな操作ボタンで、片手でかんたん操作



シンプルな3ステップですぐ聞こえます

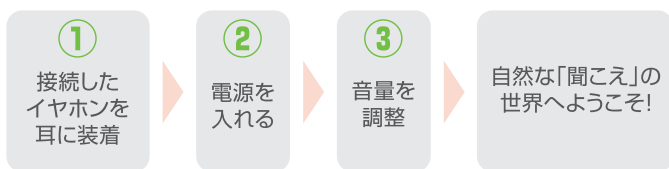

安心・便利な  
クリップ



クリップ部  
落下を防止するクリップ付きで、  
ポケットなどに挟んでご使用頂けます  
(クリップは取り外しできます)。

電源ランプでON/OFFを一目で確認



## イヤホン部

扱いやすさを追求した  
快適な装着性とストレスのない使用感



セルフフィットホルダー

● 耳のくぼみにフィットし、外れにくく  
装着性を高めます。



● 4サイズのイヤチップから自分に合った  
最適なサイズ(XS/S/M/L)を選べます。



● 色分けされた「左」「右」の  
漢字表記を施していますので、  
左右がかたんに分かります。

## 充電

便利な充電式

付属の充電器でかんたん充電。

- 付属充電電池で約21時間の連続使用が可能です。  
(充電時間:最大3.5時間)
- 充電切れになっても、  
市販の乾電池(単4形乾電池/1個)  
が使えます。
- 電池残量が少なくなると電源ランプが  
赤く点滅しイヤホンからビビ音で  
お知らせします。



## 【付属品】

イヤホンチップ:XS、S、M、L  
専用単4形充電電池  
充電器  
ACアダプター  
保証書  
取扱説明書  
簡単マニュアル

## オプション



イヤホンマイク(両耳用)  
**VMR-AE09(N)** (コード長:1.2m)  
希望小売価格 6,000円(税別)  
JANコード:4573243091389

## フェミニVMR-M750(N)の主な仕様

方式	デジタル
最大音量利得	42dB
最大出力音圧レベル	115dB SPL
イヤホン部(ドライバー口径)	密閉型ダイナミック(φ10mm)
マイク部	エレクトレットコンデンサー型
イヤホンタイプ	両耳
使用時間(周囲の温度や使用状況により異なる場合があります)	約21時間(付属充電電池) 約24時間(アルカリ乾電池) 約10時間(マンガン乾電池)
電源	DC1.2V(単4形専用ニッケル水素充電電池×1) 単4形電池も使用可能
消費電力(充電器)	充電時 2.5W 待機時 0.2W
充電回路	○
外形寸法(W*H*D)	33.5×76×14 mm クリップ部含まず
本体質量	19g(電池、クリップ部を除く)
ALC(自動音量調整機能)	○
左右バランス調整	○(ロータリーエンコーダー方式)
雑音抑制機能	○
ハウリング抑制機能	○
付属品	イヤホンチップ4種類(XS,S,M,L)×各2個(左右用)、 単4形ニッケル水素充電電池×1本、専用充電器、 ACアダプター、取扱説明書、簡単マニュアル、 保証書 ※イヤホン部には、Mサイズのイヤホン チップを標準装着しています。

※本製品は医療機器認定を取得した補聴器ではありません。



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

### お問い合わせ先

#### パイオニア お客様相談窓口

TEL:050-3388-6818(有料) FAX:0858-28-6190(有料)

●受付/月曜～金曜 9:30～18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く)

一部製品は、ご希望により送付修理も承ります。保証期限内でも配送送料はお客様負担となります。

<http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/>

●「Pioneer」及び「Pioneerロゴ」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。●写真の製品の色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ、もし、販売店でお分かりにならない場合は、弊社のお客様相談窓口へおたずねください。●ホームページにてカタログの請求も行ってあります。●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。ご購入の際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●このカタログに記載のオープン価格の商品は、希望小売価格を定めています。●本カタログに記載の商品の価格には、配送費・掘付費・使用後の商品引取り代金などは含まれておりません。

**製造元** オンキヨー & パイオニア イノベーションズ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番地12号

**販売元** オンキヨー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番地12号

### 取扱店



このカタログの記載内容は2017年9月現在のものです。